

### Descrizione:

Manopola in tessuto non tessuto pre-saponata con detergente a pH fisiologico, soffice e delicata sulla pelle, contiene la quantità di detergente necessaria per lavare una persona adulta.



### Indicazioni:

Le manopole pre-saponate monouso sono ideali per la pulizia di tutte le parti del corpo per pazienti di qualsiasi età; sono utili per detergere il corpo dei pazienti momentaneamente immobili a causa di una patologia o di un intervento chirurgico, anziani allettati ed incontinenti senili.

La manopola può essere utilizzata in tutti i reparti ospedalieri, in particolare modo in quelli di Geriatria, Neurologia, Terapia intensiva etc...

### Modalità d'uso:

Calzare la manopola, inumidire con acqua la superficie palmare delle manopola saponata e massaggiare la parte del corpo da trattare fino a ottenere una soffice schiuma. Sciacquare la manopola e ripassare fino a completa detersione.

Terminata l'operazione, sfilare la manopola prendendo la parte bassa, rovesciarla in modo che la parte utilizzata viene lasciata all'interno, evitando quindi il rischio di una eventuale contaminazione.

### Avvertenze:

Il prodotto è un dispositivo monouso e monopaziente. Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo da luce e fonti di calore dirette. Il prodotto usato secondo la prescrizione non è tossico. Si consiglia l'uso di guanti di protezione.

CODICE PRODOTTO:

22PLMA1502260-72



CONFEZIONAMENTO:

BUSTA DA 25 PZ

Distribuito da:

**Lombarda H S.r.l**

Loc. Cascina Faustina 20080 Albairate (MI) - Tel. +39 02.949.20.509 [www.lombardah.com](http://www.lombardah.com)